

نحوه تهیه لام جهت بررسی پارازیت‌های خونی (مالاریا، فیلاریا و اسپیروکت)

* لام ضخیم: ۲ عدد لام تهیه شود

یک قطره کوچک از نمونه خون سر انگشت (نه EDTA) بر روی لام قرارداده و سپس با گوشه لام دیگر پخش شود به نحوی که بعد از خشک شدن از پشت اسمیر نوشته‌های کتاب قابل دیدن باشد (یعنی ضخامت لام زیاد نباشد).

سپس لام سریعاً خشک شود و بدون فیکس با الکل آنرا با رنگ گیسما (فقط گیسما) رنگ آمیزی شود.

* لام نازک: شبیه بقیه لام‌های تهیه شده در بخش هماتولوژی از روی نمونه CBC تهیه و فیکس شود و ارسال شود. (رنگ آمیزی در آزمایشگاه نوبل انجام می‌گیرد).

روش آماده سازی لام جهت بررسی پارازیت‌های خونی

