

راهنمای پذیرش نمونه جهت بررسی CD مارکر

پرسنل محترم نمونه گیری، پذیرش و ارسال لطفا توجه فرمایید که نمونه بیمار جهت انجام تست در **دمای یخچال** به آزمایشگاه منتقل شود. اگر چنانچه نمونه در شرایط دمایی دیگری به آزمایشگاه ارسال شده است، حتما پرسنل فنی بخش را مطلع کنید.

- ۱- از زمان نمونه گیری تا زمان ارسال نمونه به آزمایشگاه و انجام تست بیشتر از ۲۴ ساعت نگذشته باشد، در غیر اینصورت نمونه پذیرش نخواهد شد (رد نمونه).
 - ۲- نمونه ارسالی به آزمایشگاه حتما حتما در یخچال قرار گرفته باشد و هنگام ارسال زنجیره سرد به خوبی رعایت شود.
 - ۳- نمونه هایی که سانتریفیوژ شده است به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشند (رد نمونه).
 - ۴- نمونه های دارای همولیز و یا لیپمیک واضح قابل پذیرش نمی باشند (رد نمونه).
 - ۵- ۵ سی سی نمونه خون کامل دارای EDTA می باشد، نهایتا ۳ ویال کافی است و نمونه بیشتر ارسال نشود.
 - ۶- روزهای قبل از تعطیلی ترجیحا نمونه گیری انجام نشود (به ویژه نمونه های حساس مانند مغز استخوان، CSF ، BAL و ...)
 - ۷- نوع نمونه برای CD مارکرها و DHR حتما حتما EDTA باشد و نمونه هپارینه رد نمونه محسوب میگردد.
 - ۸- نمونه های BMA حتما به همراه یک نمونه خون محیطی ارسال شود و نوع نمونه مشخص شده باشد (نمونه مغز استخوان از خون محیطی تفکیک شده باشد)
 - ۹- ۲ عدد لام از نمونه های BMA بصورت تازه و بدون رنگ آمیزی بر بالین بیمار یا نهایتا هنگام ارسال نمونه تهیه شود.
 - ۱۰- حتما اطلاعات و سابقه بیماری و دلیل مراجعه به پزشک از بیمار پرسیده شود و در فرم همراه نمونه ارسال گردد.
- در مورد این تست، نیاز به اطلاعات CBC بیمار جهت گزارش پاسخ صحیح نیز می باشد. لطفا در هنگام پذیرش نمونه اطلاعات CBC را نیز درخواست کرده و به همکاران فنی بخش فلوسیتومتری گزارش دهید. اگر بیماری تست CBC نداشت، لطفا این تست را نیز برای وی پذیرش نمایید.